

INSTRUKTIONEN UND INFORMATIONEN DES HERSTELLERS

Dieses Erzeugnis erfüllt die Norm **EN149:2001+A1:2009** Atemschutzmasken – Filternde Halbmasken zum Schutz gegen Partikel.

Modell: **K8201** Filternde Falt-Halbmaske ohne Ventil, ausgestattet mit Ohrschlaufen mit Kopfbündelclip.

Klasse: **FFP2 NR**

Benannte Stelle: **N.2834**

CCQS Certification Services Limited

Anschrift: Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1
Dublin, Irland

Hersteller:

Carte Medical Equipment (Suzhou) Co., Ltd.

Anschrift: No.1978, Fenhui National Road, Wujiang City, Suzhou City,
Jiangsu Province, China

Erklärung zur Produktkennzeichnung:



	FFP2 - Schutzklasse
->Identifikation des Herstellers	NR ->Verwendung nur für eine Schicht
K8201 ->Produkt-Modellbezeichnung	CE ->CE-Logo
EN149:2001+A1:2009 ->Standard	2834 ->Benannte Stelle

Warnung:

Eine richtig ausgewählte Atemschutzmaske ist unerlässlich. Vor der Verwendung am Arbeitsplatz muss der Träger vom Arbeitgeber in der korrekten Verwendung der Atemschutzmaske gemäß den geltenden Sicherheits- und Gesundheitsnormen geschult werden. Sie wird zum individuellen Schutz der menschlichen Atmungsorgane vor Aerosolen unterschiedlicher Zusammensetzung verwendet.

Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Einschränkungen könnte die Wirksamkeit dieser Partikelhalbmaske ernsthaft beeinträchtigen und zu Krankheit, Verletzung oder Tod führen.

Anwendung:



1. Halten Sie die partikelfiltrierende Halbmaske über Nase und Mund in Position.
2. Ziehen Sie die Bänder hinter die Ohren, befestigen Sie diese an der Halsklammer, so dass die Maske bequemer sitzt und Leckagen verhindert werden.
3. Biegen Sie den Nasenclip um die Finger, um ihn der Form der Nase anzupassen.
4. Zum Testen des Sitzes beide Hände über die Maske legen und kräftig ausatmen. Wenn Luft um Ihre Nase strömt, drücken Sie die Nasenkammer fest. Wenn an den Rändern der Maske Luft austritt, positionieren Sie die Bänder neu.
5. Wechseln Sie die partikelfiltrierende Halbmaske sofort aus, wenn das Atmen schwierig wird oder die partikelfiltrierende Halbmaske beschädigt oder verzogen ist.
6. Wechseln Sie die partikelfiltrierende Halbmaske aus, wenn eine ordnungsgemäße Gesichtsabdichtung nicht erreicht werden kann.
7. Die sorgfältige Beachtung dieser Anweisungen ist ein wichtiger Schritt zum sicheren Gebrauch der Atemschutzmaske.

Verwendung, Pflege und Reinigung

Diese mit "NR" gekennzeichnete Partikelhalbmaske darf nicht länger als für eine Schicht verwendet werden. Das Produkt kann nicht gewaschen oder desinfiziert werden. Diese Partikelhalbmaske liefert keinen Sauerstoff. Verwenden Sie sie nur in ausreichend belüfteten Bereichen mit genügend Sauerstoff zum Leben.

Die partikelfiltrierende Halbmaske muss vor jedem Gebrauch inspiziert werden, um sicherzustellen, dass keine Löcher in der Atmungszone vorhanden sind, mit Ausnahme von Einsätzen um diese herum und Klammern, und dass keine Schäden aufgetreten sind. Größere Löcher, die durch angespanntes oder zerfasertes Filtermaterial in der Nähe von Heftklammerstichen entstanden sind, werden als Schäden betrachtet.

Diese Atemschutzmaske trägt zum Schutz vor bestimmten partikelförmigen Verunreinigungen bei, schließt jedoch nicht aus, dass man sich dem Risiko aussetzt oder sich mit einer Krankheit oder Infektion infiziert. Ein Missbrauch kann zu Krankheit oder Tod führen.

Verwenden Sie die Partikelhalbmaske nicht bei Gesichtsbehaarung oder unter anderen Bedingungen, die eine gute Gesichtsabdichtung verhindern können, damit die Anforderungen an die Vermeidung einer Leckage erfüllt werden.

Entsorgen Sie die Atemschutzmaske und ersetzen Sie sie durch eine neue, wenn:

1. Die übermäßige Verstopfung der Partikelhalbmaske Atembeschwerden verursacht.
2. Die Partikelhalbmaske beschädigt wird.
3. Verlassen Sie den kontaminierten Bereich, wenn Schwindel, Irritation oder andere Beschwerden auftreten.

Lagerung, Transport, Entsorgung:

An einem sauberen, trockenen Ort bei einer Temperatur von -20°C bis +38°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80% lagern.

Die Produkte werden mit allen Verkehrsregeln gemäß den für jede Transportart geltenden Güterbeförderungsregeln transportiert. Lagern und transportieren Sie dieses Produkt in seiner Originalverpackung.

Mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgen.

Sicherheitsanforderungen

Verwenden Sie das Atemschutzgerät nicht und betreten Sie kein kontaminiertes Gebiet oder halten sich dort auf, wenn folgende Umstände vorliegen

1. Die Atmosphäre enthält weniger als 19,5% Sauerstoff.
2. Wenn Sie eine Verunreinigung riechen oder schmecken.
3. Zum Schutz gegen Gase oder Dämpfe.
4. Schadstoffe oder ihre Konzentrationen unbekannt oder unmittelbar gefährlich sind für Leben oder Gesundheit.
5. Für Sandstrahlen, Farbspritzverfahren und Asbest.
6. In explosionsgefährdeten Bereichen.

Die Maske darf nicht verändert oder missbräuchlich verwendet werden.

