



BENUTZERHINWEISE

Verwendung:

Eine Filtrierende Halbmaske ist ein persönliches Produkt zum Schutz der Atemwege, um sich vor den schädlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung in Form von festen und / oder flüssigen Partikeln zu schützen, die Aerosole (Staub, Dämpfe und Nebel) bilden.

Vor dem Gebrauch zu beachten:


Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Halbmaske keine sichtbaren mechanischen Schäden aufweist, nicht kontaminiert ist und das Verfallsdatum nicht abgelaufen ist.

Die Halbmaske sollte nicht verwendet werden, wenn ein Schaden festgestellt wurde oder die Halbmaske ihr Ablaufdatum überschritten hat.

Gebrauchsanweisung:

1. Hände 30 Sekunden mit Seife waschen
2. Maske aufrichten
3. Maske unter dem Kinn ansetzen, den Nasenbügel nach oben ziehen
4. Gummiband um die Ohren legen
5. Mit beiden Händen den Nasenbügel an den Nasenrücken anpassen
6. Maske andrücken und Sitz kontrollieren

Bitte beachten Sie: Die Maske muss nach jedem Gebrauch ausgetauscht werden

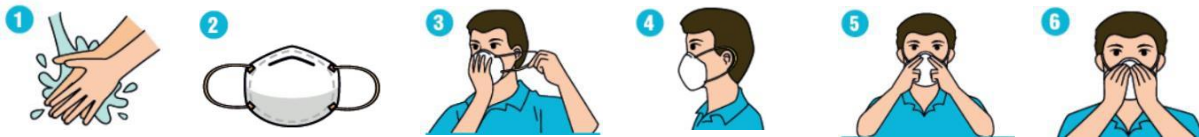

Einschränkungen und Warnungen:

- Bevor Sie die Filtrierende Halbmaske verwenden, prüfen Sie zunächst, ob sie für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist;
- Stellen Sie vor Berührung der Maske sicher, dass Ihre Hände sauber sind, Prüfen Sie die Maske auf Beschädigungen. Ist die Maske beschädigt, sollte sie entsorgt und ersetzt werden. Richten Sie die Maske richtig herum aus;
- Die Halbmaske ist zum Einmalgebrauch bestimmt und kann nicht wiederverwendet werden;
- Die Filtrierende Halbmaske muss gut passen und über Mund, Nase und Wangen sitzen. Die Ränder der Maske sollten eng anliegen und keine Luftströme an der Maske vorbei erlauben. Eine FFP-Maske kann ihre volle Filterleistung nur dann erbringen, wenn sie dicht sitzt. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Anforderungen erfüllt werden, falls Gesichtshaare unter der Dichtlinie am Gesicht sind;
- Wenn die Halbmaske beschädigt ist, entsorgen Sie diese und ersetzen Sie sie durch eine Neue;
- Die Halbmaske darf nicht bei Explosionsgefahr, in stark verschmutzter Umgebung, bei Sauerstoffmangel, bei Brand und Arbeiten unter Wasser verwendet werden;
- Die Filtrierende Halbmaske schützt das Atmungssystem nicht vor Aerosolen, radioaktive Partikel oder vor gefährlichen Dämpfen/Gasen;
- Die Halbmaske liefert keinen Sauerstoff. Es sollte nur in gut belüfteten Bereichen verwendet werden;
- Die Halbmaske ist als Einwegprodukt vorgesehen (NR). Sie sollte regelmäßig gewechselt und nach Verwendung entsorgt werden;

Aufbewahrung:

Bewahren Sie die Masken in der Originalverpackung, fern von kontaminierten Orten, Staub, Sonnenlicht, extremen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Chemikalien, bitte beachten Sie hierzu auch die Temperaturangaben auf der Verpackung.







Verfallsdatum:

Wenn das Produkt unter den vom Hersteller angegebenen Bedingungen gelagert wird gilt das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum.

Die Filtrierende Halbmaske ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III. Sie erfüllt die Anforderungen der EN 149: 2001 + A1: 2009

Konformitätserklärung auf der Website verfügbar: <https://virshields.com/>

Erläuterung der auf der Verpackung und im Benutzerhandbuch verwendeten Symbole:

	<p>CE-Kennzeichnung: Bestätigung der Einhaltung der EU Verordnung 2016/425 Nummer der benannten Stelle, die das Produkt zertifiziert hat</p>		<p>Im Temperaturbereich lagern (s. Verpackung)</p>
	<p>Losnummer der Produktion</p>		<p>Angegebenen Feuchtigkeitsbereich beachten (s. Verpackung).</p>
	<p>Siehe Gebrauchsanweisung / zusätzliche Informationen</p>		<p>Ablaufdatum Jahr / Monat</p>
<p>FFP2</p>	<p>Symbol der Schutzklasse der Filterhalbmaske (Schutzklasse gemäß EN 149: 2001 + A1: 2009, Filtereffekt ≥ 94%)</p>	<p>NR</p>	<p>Non Reusable / nicht wiederverwendbar</p>