



# Milibac N

## Flächendesinfektion • Kalklöser

### Einsatzbereich

Zur Desinfektion säurebeständiger Flächen im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Industrie und öffentliche Einrichtungen (Sanitärbereich, Schwimmbad, Wellness). MILIBAC N entfernt mineralische und organische Verschmutzungen.

### Anwendung

Fläche mit MILIBAC N - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Anwendungsbeispiel für 1 Liter einer 2%igen Lösung: 980 ml Wasser vorlegen und 20 ml Produkt zugeben.

| Anwendungsgebiet/Wirksamkeit  | Konzentration/Einwirkzeit | Anmerkung  |
|---|---------------------------|--|
| Bakterizid, levurozid (Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen) | 2,0 % 15 Min.             | EN 1276, Niedrige Belastung; EN 1650, Niedrige Belastung; EN 13697, Niedrige Belastung |
| Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)  | 2,0 % 5 Min.              | EN 14476, Niedrige und hohe Belastung  |
| Polyomaviren (SV40)   | 2,0 % 5 Min.              | EN 14476, Niedrige Belastung   |

### Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- HACCP-konform

### Hinweis

Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden. Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen. Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre. Haltbarkeit nach Anbruch 3 Jahre. Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Technische Informationen

Karton mit 12 Flaschen à 1 Liter Art.-Nr. 00323  
Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 30092

### Wirkstoffe

100 g enthalten 5,6 g Milchsäure; 3,0 g Ethanol

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS05

BAuA Reg.-Nr. N-84501

CHZN6347

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Passendes Zubehör finden Sie auf unserer Website:



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0221

pH conc 2 4 6 8 10 12 14

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taanusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE