

# BODE X-Wipes basic

## Reinigende Flächendesinfektion



**Vliestücher – in Verbindung mit dem BODE X-Wipes Spender - zum Nachfüllen für alle flüssigen Flächen-Desinfektionsmittel von BODE.**

# BODE X-Wipes basic



## Eigenschaften

- reißfestes und fusselfreies Vlies
- kostengünstig
- universell einsetzbar
- sparsam im Verbrauch von Tüchern und Anwendungslösung
- Lösung 4 Wochen verwendbar
- für alle flüssigen Flächen-Desinfektionsmittel von BODE

Die BODE X-Wipes basic sind universell einsetzbare Vliestücher zum Nachfüllen im entsprechenden Spender für die desinfizierende Reinigung von Oberflächen. Dem Anwender bieten sich mit den BODE X-Wipes basic viele Vorteile: Der Einmalgebrauch der Tücher reduziert die Arbeitsvorbereitungszeit und stellt einen hohen hygienischen Standard sicher. Der BODE X-Wipes Spender wird mit 2,5 – 3 Litern Anwendungslösung des BODE Flächen-Desinfektionsmittels befüllt.

## Anwendungsgebiete

BODE X-Wipes basic empfehlen sich zur desinfizierenden Flächenreinigung in vielen Bereichen von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und Lebensmittelbetrieben, in denen besonderes Augenmerk auf Wirtschaftlichkeit, Hygiene und Anwenderkomfort gelegt wird, z. B.:

- auf Arbeitsflächen
- auf Patientenliegen
- in der dezentralen Bettenaufbereitung
- auf Nachttischen und anderen patientennahen Flächen
- an Einsatzorten, an denen kein Wasseranschluss verfügbar ist
- überall dort, wo eine hygienische Aufbereitung von Reinigungsutensilien nicht möglich ist.

Der Einsatz von BODE X-Wipes basic in Verbindung mit Instrumenten-Desinfektionsmitteln und -Reinigern ist nicht gegeben.

## Aufbau und Material

Das System besteht aus dem nachfüllbaren BODE X-Wipes Spender mit praktischem Tragegriff, der mit einer trockenen Vliesrolle mit einzeln abreißbaren BODE X-Wipes basic befüllt wird und dem im Deckel integrierten Entnahmesystem mit Schutzkappe sowie beschriftbaren Etiketten.

Qualitätskontrollen gewährleisten, dass die X-Wipes basic in einem mikrobiologisch unbedenklichen Zustand ausgeliefert werden. Beim BODE X-Wipes Spendersystem wurden ausschließlich Materialien verwendet, die über eine hohe Belastbarkeit verfügen:

- BODE X-Wipes basic bestehen aus reißfestem und fusselfreiem Material und bieten mit 40 g / m<sup>2</sup> eine leichte Vliesqualität. Die Vliesrollen sind in Sechserpackungen erhältlich.
- Das Entnahmesystem besteht aus Polypropylen und ist im Systemdeckel integriert. Es steht in den Farben blau, grün und rot zur Verfügung und erlaubt daher die schnelle optische Unterscheidung von aldehydfreien (blau), aldehydhaltigen (grün) und alkoholischen (rot) Produkten.
- Jeder BODE X-Wipes basic Vliesrolle sind beschriftbare Etiketten für das Eintragen von Produktname, Konzentration, Datum des Ansetzens der Lösung, Haltbarkeit und Name des Mitarbeiters beigelegt.



## Anwendung

Die BODE X-Wipes basic sind für den Einsatz mit allen BODE Flächen-Desinfektionsmitteln in Konzentration mit einer Einwirkzeit von einer Stunde oder kürzer (gem. VAH) geeignet. Der BODE X-Wipes Spender wird mit 2,5 – 3 Liter Desinfektionsmittellösung befüllt.

Bei der Herstellung der Anwendungslösungen sind die anwendungs- und sicherheitstechnischen Hinweise des jeweiligen Produktes und die VAH-Einsatzkonzentrationen zu beachten.

## Befüllung

1. Je nach verwendetem Desinfektionsmitteltyp entsprechend farbiges Entnahmesystem wählen. Zum Schutz der Vliesrolle vor Kontaminationen Handschuhe anziehen.
2. Vliesrolle der Verpackung entnehmen, Deckel des Spenders abnehmen und die trockene Vliesrolle einlegen. Dabei den Anfang der Vliesrolle ein kleines Stück aus der Mitte herausziehen.
3. 2,5 – 3 Liter gebrauchsfertige Anwendungslösung des gewünschten Desinfektionsmittels entsprechend den Herstellerangaben in der gewünschten VAH-Konzentration herstellen und in den BODE X-Wipes Spender geben. Die Lösung langsam spiralförmig von der Mitte nach außen über die Vliesrolle gießen um eine vollständige Benetzung sicher zu stellen.
4. Nach circa 10 Minuten ist die Rolle gleichmäßig durchtränkt und einsatzbereit.
5. Das erste BODE X-Wipe basic aus der Mitte der Rolle durch die Öffnung des Entnahmesystems führen und verwerfen. Deckel auf den Spender aufsetzen und rundherum andrücken, bis er einrastet. Schutzkappe des Entnahmesystems anschließend sorgfältig verschließen.
6. Beiliegendes Etikett vollständig beschriften und auf die vorgegebene Fläche des X-Wipes Spenders kleben.

## Standzeit

Bei ordnungsgemäßem Verschluss verfügen die in Verbindung mit den BODE X-Wipes basic eingesetzten Desinfektionsmittellösungen von BODE über eine Standzeit von 4 Wochen.

## Wiederbefüllung

Bei der Wiederbefüllung ist Folgendes zu beachten:

1. Vlies- und Flüssigkeitsreste entsorgen.
2. Spender und Einzelteile des BODE X-Wipes Spendersystems gründlich mit einem in Desinfektionsmittellösung getränkten Lappen reinigen. Alle Teile trocknen lassen.
3. Neue Vliestuchrolle und Anwendungslösung wie beschrieben einsetzen.
4. Neues, korrekt beschriftetes Etikett anbringen.

## Zubehör

Die Zubehörteile für den BODE X-Wipes Spender bieten eine praktische und kostengünstige Möglichkeit, die X-Wipes basic Vliestücher platzsparend und sicher aufzubewahren.

Folgende Produkte sind optional erhältlich:

- Wandhalter zur praktischen Aufbewahrung des BODE X-Wipes Spendersystems
- Sicherungsbügel zur Diebstahlsicherung

Beide Zubehörteile bestehen aus rostfreiem Stahl.



# BODE X-Wipes basic

## Packungen

<b>Packungen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Art.-Nr.</b>
BODE X-Wipes Spender (Entnahmesystem blau)	4 Stück	976660
BODE X-Wipes Spender (Entnahmesystem grün)	4 Stück	976670
BODE X-Wipes Spender (Entnahmesystem rot)	4 Stück	976680
BODE X-Wipes basic Vliesrolle (Rolle a 90 Einzeltücher)	6 Rollen	975790
BODE X-Wipes Wandhalter	Stück	977100
BODE X-Wipes Sicherungsbügel	Stück	977111

