



# DESIFOR-QUICK



## Flächendesinfektion • begrenzt viruzid

### Einsatzbereich

Zur rückstandsfreien Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

### Anwendung

Zu desinfizierende, saubere Fläche vollständig benetzen und abtrocknen lassen. Einwirkzeit beachten.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid, levurozid (Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen)	konz. 1 Min.	EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 16615 Hohe Belastung
Bakterizid, levurozid (Humanmedizinischer Bereich)	konz. 5 Min.	VAH; EN 13727, EN 13624, EN 16615 Hohe Belastung
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek.	EN 14348 Hohe Belastung
Mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	konz. 1 Min.	EN 14348 Hohe Belastung
Begrenzt viruzid	konz. 15 Sek.	EN 14476 Niedrige Belastung
Begrenzt viruzid	konz. 1 Min.	EN 16777 Hohe Belastung
Noroviren	konz. 30 Sek.	EN 14476 Niedrige Belastung
Rotaviren	konz. 30 Sek.	EN 14476 Ohne Belastung

### Technische Informationen

Karton mit 10 Spenderfl. EURO à 500 ml

Art.-Nr. DRS00177

Karton mit 6 Fl. à 500 ml,

2 Sprühaufsätze

Art.-Nr. 00521

Karton mit 2 Fl. à 1 Liter

inkl. 2 Sprühaufsätze

Art.-Nr. 20522

Kanister à 5 Liter

Art.-Nr. 20451

### Wirkstoffe

100 g enthalten 63,1 g 2-Propanol; 2,9 g Ethanol

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS02, GHS07

BAuA Reg.-Nr. N-58211, N-58212

CHZN5689

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder-Test)
- VAH-gelistet
- HACCP-konform

### Hinweis

Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie z. B. Acrylglas/Plexiglas. Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre. Haltbarkeit nach Anbruch 3 Jahre. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Passendes Zubehör finden Sie auf unserer Website:



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 1121

pH conc **0 2 4 8 10 12 14**

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
 Taunusstraße 19 · 80807 München  
 Tel. +49 89 3506080  
 info@dr-schnell.de  
 www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
 QUALITÄT UND SERVICE