

Aerodesin® 2000



Gebrauchsfertige Sprühdesinfektion auf Alkoholbasis zur Schnell-Desinfektion von Medizinprodukten

CE 0482



Gebrauchsinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Aerodesin® 2000

Gebrauchsfertig

Zusammensetzung

100,0 g **Lösung** enthalten:
32,5 g Propan-1-ol, 18,0 g Ethanol (vergällt) 0,1 g Glutaral

Anwendungsgebiete

Zur Schnell-Desinfektion von

- **kleinen** Flächen und Gegenständen
- schwer zugänglichen Flächen

Art der Anwendung/Dosierungsanleitung

Unverdünnt anwenden!

Aerodesin® 2000 aus ca. 30 cm Entfernung versprühen (max. 2 m²). Die Flächen und Gegenstände sind vollständig zu benetzen (max. 50 ml/m²).

Flächen-Desinfektion

Hospitalismus-Prophylaxe	konz. - 1 Min.
begrenzt viruzid* inkl. HBV/HCV/HIV	konz. - 30 Sek.
Viruzid*	konz. - 30 Min.
Adenovirus	konz. - 5 Min.
Polyomavirus (SV 40)	konz. - 15 Min.

*gem. RKI-Empfehlung BG-Blatt 01/2004

Warn- und Lagerhinweise

- **Aerodesin® 2000** ist entzündlich (Flammpunkt nach DIN 51755: 26,5 °C)!
- Nicht in offene Flamme oder auf glühende Körper sprühen!
Ausbringung max. 50 ml/m²
- Desinfektionsmittel bei 5 - 30 °C, nicht in der Nähe von Zündquellen und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin,
Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-259

Eigenschaften

- bekämpft Bakterien (inkl. Tbc), Pilze und Viren
- schneller Wirkungseintritt und rasche Abtrocknung nach Besprühen der Flächen und Gegenstände
- frischer Geruch
- gute Netzfähigkeit
- gebrauchsfertiges Präparat in treibgasfreier Sprühflasche

Besondere Hinweise

a) Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßem Gebrauch

Aerodesin® 2000 ist reizend bei Kontakt mit Schleimhäuten (Augen, Rachen, Magen, Darm etc.). Als Sofortmaßnahmen bei solchen Reizungen wird die Verdünnung des Präparates empfohlen. Bei **oralen** Einnahme **reichlich** Wasser trinken, bei Kontakt mit sonstigen Schleimhäuten **reichlich** mit Wasser spülen. In jedem Fall ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

b) Sonstiges

Keine alkoholempfindlichen Materialien (Lackierungen, Beizungen, Acrylglas u.a.) besprühen.

c) Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Gebrauchsinformation lesen.

Zertifiziert und in den einschlägigen Listen aufgeführt.

Mode d'emploi

à lire attentivement!

Aerodesin® 2000

Désinfectant par pulvérisation à base d'alcool pour une désinfection rapide des surfaces et des dispositifs médicaux - prêt à l'emploi.

Composition

100 g de solution contiennent:

32,5 g 1-propanol, 18 g d'éthanol (dénaturé), 0,1 g glutaral

Domaines d'application

Pour une désinfection rapide des

- petites surfaces et petits objets
- surfaces difficiles à atteindre

Mode d'utilisation/Dosage

Utilisation non diluée seulement!

Pulvériser **Aerodesin® 2000** sur les objets à une distance d'environ 30 cm (max. 2 m²). Les surfaces et objets doivent être entièrement humidifiés (max. 50ml/m²).

Désinfection des surfaces

A l'hôpital et au cabinet médical	concentré - 1 mn
Virucide vis-à-vis des virus enveloppés* HBV/HCV/HIV inclus	concentré - 30 sec
Virucide*	concentré - 30 mn
Adénovirus	concentré - 5 mn
Polyomavirus (SV 40)	concentré - 15 mn

*conf. aux recommandations du RKI publiées de 01/2004

Précaution d'emploi et de stockage

- **Aerodesin® 2000** est facilement inflammable (point éclair conformément a la DIN 51755: 26,5°C)!
- Ne pas vaporiser en direction d'une flamme nue et/ou un objet incandescent! Quantité max. a pulvériser: 50ml/m².
- Ceci est un désinfectant! Conserver à 5-30°C, loin des produits inflammables, et hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser au delà de la date de péremption.

Propriétés

- Lutte contre les bactéries (BK inclus), champignons et virus
- Efficacité et séchage rapides après vaporisation sur objets et surfaces
- Odeur fraîche
- Bon pouvoir tensio-actif
- prêt à l'emploi, dans un flacon vaporisateur sans gaz propulseur.

Observation particulières

- a) Contre mesures en cas d'utilisation incorrecte:
Au cas ou **Aerodesin® 2000** viendrait en contact avec les muqueuses et provoquerait des irritations (yeux, gorge, estomac, intestins ect.), il est conseillé de diluer le produit immédiatement. En cas de prise orale, diluer le produit sans attendre en faisant boire une quantité d'eau importante au patient. En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l'eau. Dans tous les cas, consulter immédiatement un médecin.
- b) Généralités:
Ne pas vaporiser sur des surfaces craignant l'alcool (laques, vernis, plexiglas).
- c) Utiliser le produit en toute sécurité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et le prospectus.

Ce produit est certifié conforme et figure sur les listes appropriées.

Versandeinheit/Packung

12 x 1-Liter-Flasche mit Sprühkopf
2 x 5-Liter-Kanister

Art.-Nr.

9736
9725

Unités d'envoi/Conditionnement

12 x 1000 ml vaporisateur avec bouchon
2 x 5 litres

9736
9725

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an. Wir rufen sofort zurück.

**Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –
Nous vous rappellerons aussitôt!**

D: ☎ 030 - 77 99 2-0

CH: ☎ 056 - 441 69 81



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin

Telefax 030 - 77 99 2-259

www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

Info.-Telefon 0700LYSOFORM



LYSOFORM

Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG

Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch

Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14