

# MoliCare® Premium Form

## Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Bei MoliCare® Premium Form handelt es sich um saugfähige Einlagen zur Inkontinenzversorgung. In Kombination mit Fixierhosen eignen sich die Produkte für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Blasenschwäche sowie unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz.

Produkte der Reihe MoliCare® Premium Form sind für die Verwendung bei mobilen bis hin zu immobilen Frauen und Männern ausgelegt.


MoliCare® Premium Form MEN sind für die Verwendung bei mobilen bis hin zu immobilen Männern ausgelegt.

Die Produkte sind ausschließlich zur einmaligen Benutzung gedacht und sollten regelmäßig je nach Bedarf gewechselt werden.

Produkte der Reihe MoliCare® Premium Form können sowohl in der häuslichen Pflege als auch in professionellen Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. Sie können dabei von medizinischen Fachkräften und Laien gleichermaßen verwendet werden.

## Anwendung/Indikation

Harn- und Stuhlinkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden

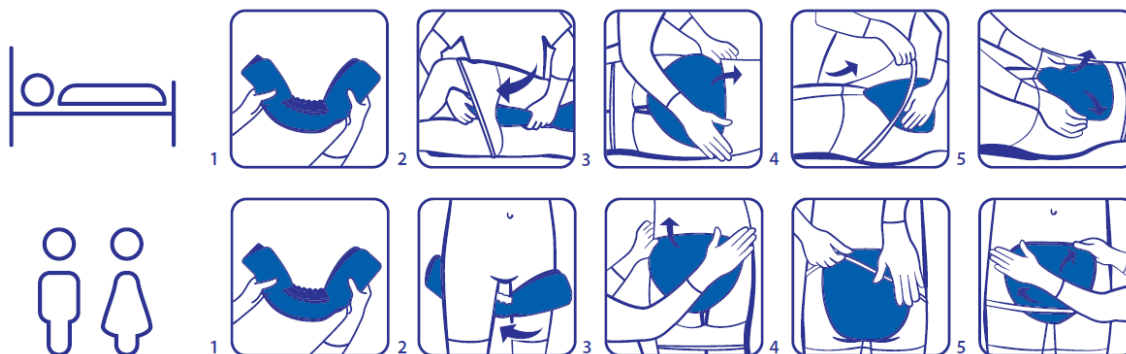

## Artikelnummern\*

| Verpackung    | P32     | P16     | Displaypalette (P32) | P2      |
|---------------|---------|---------|----------------------|---------|
| 3 Tropfen     | 168 403 | -       | -                    | 168 203 |
| 4 Tropfen     | 168 404 | -       | 168 804 / 168 904    | 168 204 |
| 5 Tropfen     | 168 405 | -       | 168 805 / 168 905    | 168 205 |
| 6 Tropfen     | 168 406 | -       | 168 806 / 168 906    | 168 206 |
| 7 Tropfen     | 168 407 | -       | 168 907              | 168 207 |
| 8 Tropfen     | 168 408 | -       | 168 808 / 168 908    | 168 208 |
| 9 Tropfen     | -       | 168 409 | -                    | 168 209 |
| 6 Tropfen MEN | 168 401 | -       | -                    | 168 201 |

# MoliCare® Premium Form

\*Das komplette Sortiment ist möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich

## Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage. Eine Wiederverwendung des Produkts kann zu mikrobiellen Kontaminationen und/oder leichten Hautinfektionen führen.

## Produktentsorgung

Um das Risiko potentieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sind Einmalkomponenten von MoliCare® Premium Form entsprechend den Entsorgungsverfahren gemäß den geltenden lokalen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen sowie den Standards zur Infektionsprävention zu entsorgen.

## Meldung von Vorkommnissen

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte); wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.

## Leistungsmerkmale des Produkts

| Eigenschaften          | Einheit    | 3 Tropfen | 4 Tropfen | 5 Tropfen | 6 Tropfen | 7 Tropfen | 8 Tropfen  | 9 Tropfen  | 6 Tropfen<br>MEN |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|
| <b>Gesamtgewicht:*</b> | <b>[g]</b> | <b>50</b> | <b>57</b> | <b>62</b> | <b>93</b> | <b>97</b> | <b>105</b> | <b>131</b> | <b>93</b>        |

\* ± 10 % Maßabweichung

## Materialeigenschaften

| Teil            | Material   |
|-----------------|--|
| Rückseite:      | Polyethylen, Vlies-Folien-Laminat, weiß  |
| Saugkern:       | Zellstoff*<br>Superabsorbierendes Polymer<br>pH-Pufferlösung<br>Vlies, hydrophil, weiß |
| Kleber:         | Schmelzkraftkleber   |
| Oberseite:      | Polypropylen-Vlies, hydrophil, weiß  |
| Bündchen:       | Polypropylen-Vlies, hydrophob, weiß  |
| Elastikfäden:   | Elastikfäden für Beinabschluss und Innenbündchen                                       |
| Nässeindikator: | Wasserlösliche Tinte   |

\*elementarchlorfrei gebleicht

# MoliCare<sup>®</sup> Premium Form

## Produktmerkmale

| Abmessungen                      | 3 Tropfen | 4 Tropfen | 5 Tropfen | 6 Tropfen | 7 Tropfen | 8 Tropfen | 9 Tropfen | 6 Tropfen<br>MEN |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Gesamtlänge:*                    | 525       | 620       | 620       | 690       | 690       | 690       | 690       | 690              |
| Gesamtbreite<br>Bauchseite:*     | 260       | 280       | 280       | 300       | 300       | 300       | 300       | 310              |
| Gesamtbreite<br>Rückenseite:*    | 280       | 295       | 295       | 310       | 310       | 310       | 310       | 310              |
| Schrittbreite:*                  | 210       | 235       | 235       | 245       | 245       | 245       | 245       | 245              |
| Länge Saugkern:*                 | 474       | 560       | 560       | 630       | 630       | 630       | 630       | 630              |
| Breite Saugkern<br>Bauchseite:*  | 215       | 240       | 240       | 250       | 250       | 250       | 250       | 270              |
| Breite Saugkern<br>Rückenseite:* | 242       | 240       | 240       | 260       | 260       | 260       | 260       | 260              |
| Breite Saugkern im<br>Schritt:*  | 134       | 160       | 160       | 170       | 170       | 170       | 170       | 160              |

\* ± 10 % Maßabweichung

# MoliCare® Premium Form

## Kennzeichnung


Fertigungslosnummer mit 9-stelligem Code

z. B.: 100102822



|           |                    |                    |                    |                     |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1         | 001                | 02                 | 82                 | 2                   |
| Jahr 202X | Interner Schlüssel | Interner Schlüssel | Interner Schlüssel | Kumulierte Prüfwert |

Herstellungsdatum

z. B.:  2021 08 07  
Jahr Monat Tag

Verwendbar bis

z. B.:  2026 08 01  
Jahr Monat Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

Medizinprodukt



Vertrieb



Trocken aufbewahren



Nicht wiederverwenden



CE-Kennzeichnung



**Letzter Überarbeitungsstand: 22.11.2021**