

# MoliCare® Premium Form

## Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Bei MoliCare® Premium Form handelt es sich um saugfähige Einlagen zur Inkontinenzversorgung. In Kombination mit Fixierhosen eignen sich die Produkte für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Blasenschwäche sowie unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz.

Produkte der Reihe MoliCare® Premium Form sind für die Verwendung bei mobilen bis hin zu immobilen Frauen und Männern ausgelegt.


MoliCare® Premium Form MEN sind für die Verwendung bei mobilen bis hin zu immobilen Männern ausgelegt.

Die Produkte sind ausschließlich zur einmaligen Benutzung gedacht und sollten regelmäßig je nach Bedarf gewechselt werden.

Produkte der Reihe MoliCare® Premium Form können sowohl in der häuslichen Pflege als auch in professionellen Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. Sie können dabei von medizinischen Fachkräften und Laien gleichermaßen verwendet werden.

## Anwendung/Indikation

Harn- und Stuhlinkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden

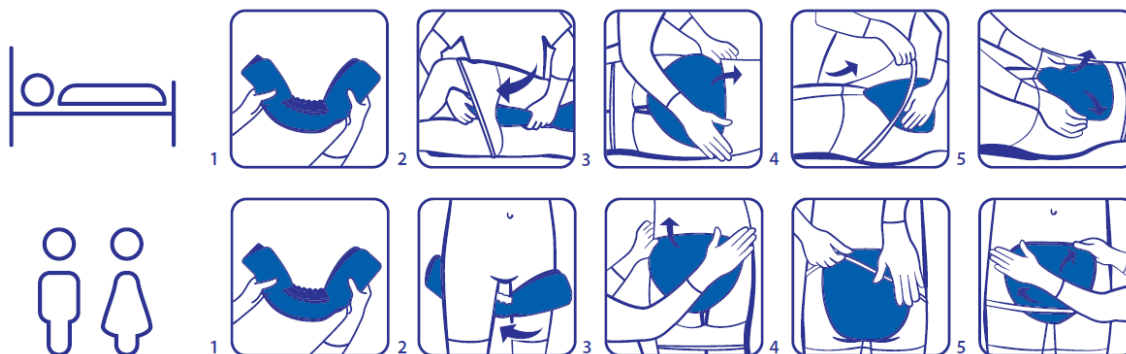

## Artikelnummern\*

Verpackung	P32	P16	Displaypalette (P32)	P2
<b>3 Tropfen</b>	168 403	-	-	168 203
<b>4 Tropfen</b>	168 404	-	168 804 / 168 904	168 204
<b>5 Tropfen</b>	168 405	-	168 805 / 168 905	168 205
<b>6 Tropfen</b>	168 406	-	168 806 / 168 906	168 206
<b>7 Tropfen</b>	168 407	-	168 907	168 207
<b>8 Tropfen</b>	168 408	-	168 808 / 168 908	168 208
<b>9 Tropfen</b>	-	168 409	-	168 209
<b>6 Tropfen MEN</b>	168 401	-	-	168 201

# MoliCare® Premium Form

\*Das komplette Sortiment ist möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich

## Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage. Eine Wiederverwendung des Produkts kann zu mikrobiellen Kontaminationen und/oder leichten Hautinfektionen führen.

## Produktentsorgung

Um das Risiko potentieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sind Einmalkomponenten von MoliCare® Premium Form entsprechend den Entsorgungsverfahren gemäß den geltenden lokalen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen sowie den Standards zur Infektionsprävention zu entsorgen.

## Meldung von Vorkommnissen

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte); wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.

## Leistungsmerkmale des Produkts

Eigenschaften	Einheit	3 Tropfen	4 Tropfen	5 Tropfen	6 Tropfen	7 Tropfen	8 Tropfen	9 Tropfen	6 Tropfen MEN
<b>Gesamtgewicht:*</b>	<b>[g]</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>62</b>	<b>93</b>	<b>97</b>	<b>105</b>	<b>131</b>	<b>93</b>

\* ± 10 % Maßabweichung

## Materialeigenschaften

Teil	Material
Rückseite:	Polyethylen, Vlies-Folien-Laminat, weiß
Saugkern:	Zellstoff* Superabsorbierendes Polymer pH-Pufferlösung Vlies, hydrophil, weiß
Kleber:	Schmelzkraftkleber
Oberseite:	Polypropylen-Vlies, hydrophil, weiß
Bündchen:	Polypropylen-Vlies, hydrophob, weiß
Elastikfäden:	Elastikfäden für Beinabschluss und Innenbündchen
Nässeindikator:	Wasserlösliche Tinte

\*elementarchlorfrei gebleicht

# MoliCare® Premium Form

## Produktmerkmale

Abmessungen	3 Tropfen	4 Tropfen	5 Tropfen	6 Tropfen	7 Tropfen	8 Tropfen	9 Tropfen	6 Tropfen MEN
Gesamtlänge:*	525	620	620	690	690	690	690	690
Gesamtbreite Bauchseite:*	260	280	280	300	300	300	300	310
Gesamtbreite Rückenseite:*	280	295	295	310	310	310	310	310
Schrittbreite:*	210	235	235	245	245	245	245	245
Länge Saugkern:*	474	560	560	630	630	630	630	630
Breite Saugkern Bauchseite:*	215	240	240	250	250	250	250	270
Breite Saugkern Rückenseite:*	242	240	240	260	260	260	260	260
Breite Saugkern im Schritt:*	134	160	160	170	170	170	170	160

\* ± 10 % Maßabweichung

# MoliCare® Premium Form

## Kennzeichnung


Fertigungslosnummer mit 9-stelligem Code

z. B.: 100102822



1	001	02	82	2
Jahr 202X	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Kumulierte Prüfziffer

Herstellungsdatum

z. B.:  2021 08 07  
Jahr Monat Tag

Verwendbar bis

z. B.:  2026 08 01  
Jahr Monat Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

Medizinprodukt



Vertrieb



Trocken aufbewahren



Nicht wiederverwenden



CE-Kennzeichnung



**Letzter Überarbeitungsstand: 22.11.2021**