



Incidin® Active

ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT BEI HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN DER FLÄCHENDESINFEKTION

- ▲ Mit einzigartigem Wirkstoffsystem
PerOxyBalance®
- ▲ Wirksam gegen *Clostridium difficile*
- ▲ VAH-gelistet, viruzid



Incidin® Active

SPORENWIRKSAME DESINFEKTION UND REINIGUNG



Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Breites Wirkspektrum inkl. Viruzidie (z.B. Noroviren) und Sporizidie (z.B. Clostridium difficile Sporen)	Sicherheit auch bei höchsten Anforderungen
pH-neutrale Anwendungslösung	Hohe Materialverträglichkeit durch patentiertes Wirkstoffsystem PerOxyBalance®
Exzellente Desinfektions- und Reinigungsleistung	Kurze Einwirkzeiten ermöglichen schnelle und effiziente Zimmersanierung und kurzfristige Wiederbelegung
Im Wechsel mit Incidin® Plus und Incidin® Extra N zur Flächendesinfektion einsetzbar	Produktwechsel ohne Zwischenreinigung, einfache Integration in bestehende Prozesse



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte

CE 0297



Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion von Flächen aller Art.
D BIOZID N-28815

WIRKSAMKEIT

KONZENTRATION

EINWIRKZEIT

VAH-Liste (bakterizid, levurozid, mycobakterizid inkl. TB ²)	%	g/L	Min.
Mit Mechanik, geringer und hoher Belastung	1	10	5
Mit Mechanik, geringer und hoher Belastung ²	2	20	5
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)	%	g/L	Min.
EN 13727 (bakterizid)	0,25	2,5	5
EN 13624 (levurozid)	0,25	2,5	5
EN 14348 (mycobakterizid)	1	10	15
EN 13704 (sporizid)	2	20	15
EN 14476 (viruzid)	2	20	10
EN 14476 (viruzid)	1	10	60
Clostridium difficile Sporen	%	g/L	Min.
Im praxisnahen Versuch mit Ribotyp 027	1	10	30
Aufgrund der Sporizidie gemäß EN 13704	2	20	15
ATCC 13720 im Suspensionstest	2	20	5
Zusätzliche Wirksamkeiten	%	g/L	Min.
Mycobakterizid inkl. TB*	1	10	30
Badewannendesinfektion	1	10	5

* gem. DGHM 2001

ANWENDUNGSHINWEISE

Gebrauchslösung durch Verdünnen mit Wasser (max. 30 °C) in der gewünschten Konzentration ansetzen.

Zu behandelnde Fläche feucht abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten. Für ausreichende Lüftung ist zu sorgen.

Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Hohe Flexibilität beim Ansetzen jeglicher Einsatzkonzentrationen und Mengen durch 1,5 kg Gebinde. Bitte wenden Sie sich bezüglich einer Dosiertabelle an Ihren Ecolab Fachberater.

ZUSAMMENSETZUNG

1% Incidin® Active Lösung enthält: > 500 ppm Peressigsäure

GUTACHTEN


Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Incidin® Active 30 518 70
Dosen 24 x 160 g

Incidin® Active 30 518 50
Eimer 4 x 1,5 kg

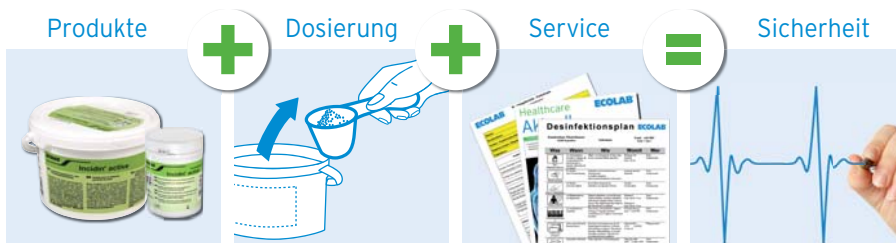

UNSERE HYGIENELEISTUNGEN SCHÜTZEN LEBEN ...

Worldwide Headquarters
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

Regional Office
Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstr. 38-42
40589 Düsseldorf
Phone +49 (0) 211 98 93-0
Fax +49 (0) 211 98 93-174
www.ecolabhealthcare.de

Regional Office
Ecolab Schweiz GmbH
Kriegackerstr. 91
CH-4132 Muttenz
Phone +41 (0) 614 66 94-66
Fax +41 (0) 614 66 94-55
www.ecolab-suisse.ch

