

INCLUDAL® WIPES

Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion



Eigenschaften / Anwendungsgebiete:

Bei den INCLUDAL® WIPES handelt es sich um weiche Tücher, die in dem Desinfektionsmittel INCLUDAL® ANTISEPT getränkt sind. Somit sind sie die wertvolle Hilfe bei der Vernichtung von Bakterien und Pilzen auf Oberflächen und Händen. Darüber hinaus eignen sich INCLUDAL® WIPES auch zur schnellen Desinfektion von medizinisch-technischen Geräten. Die der Biozidrichtlinie entsprechende Artikelkennzeichnung lautet: Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art und der Hände. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung auch für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.

Wirkungsspektrum:

INCLUDAL® ANTISEPT wirkt:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- levurozid
- begrenzt viruzid gemäß RKI-Empfehlung (inkl. Vaccinia-, BVDV, HBV, HIV, HCV, sowie Influenza-/Grippe-Viren).

Anwendungshinweise:

Flächen und Gegenstände mit INCLUDAL® WIPES vollständig abwischen, bzw. ausreichend benetzen. Alkoholempfindliche Oberflächen und Acrylglas-Kunststoffe nicht benetzen.

Hinweise zur Handhabung:

Öffnen Sie die Nachfüllpackung. Formen Sie aus der geöffneten Packung eine Rolle. Lassen Sie den Inhalt inkl. Beutel direkt in die Spenderdose gleiten. Ziehen Sie aus der Rollenmitte das erste Tuch durch die Öffnung im Deckel der Spenderdose und setzen Sie den Deckel wieder auf die Dose. Bitte befüllen Sie die Dose nur mit einer Nachfüllpackung mit INCLUDAL® WIPES Refill!

Einwirkzeiten für die Tränkflüssigkeit INCLUDAL® ANTISEPT:

Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid gem. DGHM/VAH-Richtlinien*): konz. 1 Min
Wirksam gegen alle behüllten Viren wie HBV, HIV, HCV, Vakzinia, BVDV, Influenza-, Grippe-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung): konz. 30 Sek

*) gelistet in der 5-Min.-Spalte der VAH-Liste

Beschreibung der Tränkflüssigkeit INCLUDAL® ANTISEPT:

Klare, farblose, aldehyd- und parfümfreie, alkoholische (ca. 45 %) Lösung

Zusammensetzung der Tränkflüssigkeit INCLUDAL® ANTISEPT:

100 g INCLUDAL® ANTISEPT enthalten 45,0 g Ethanol.

Wirksamkeitsprüfung:

Die Tränkflüssigkeit INCLUDAL® ANTISEPT ist VAH-gelistet:
Ein Zertifikat vom Verbund für angewandte Hygiene (VAH) bestätigt die Wirksamkeit von INCLUDAL® ANTISEPT.

Lagerungshinweise:

INCLUDAL® WIPES ist in der originalverschlossenen Nachfüllpackung bei Raumtemperatur lagerfähig. Das jeweilige Haltbarkeitsdatum ist auf der Nachfüllverpackung angegeben.

Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien:

Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.
Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Gesetzliche Vorschriften:

INCLUDAL® WIPES ist ein Biozid im Sinne der Biozid-Richtlinie 98/8/EG.
baua: Reg.-Nr. N-52790, Reg.-Nr. N-52791
Ein EG-Sicherheitsdatenblatt für die Tränkflüssigkeit INCLUDAL® ANTISEPT liegt vor. Dieses kann unter www.myxal.de heruntergeladen werden.

Bestelldaten INCLUDAL® WIPES:

INCLUDAL® WIPES Refill mit 120 Blatt

BSW-Nr.: 13887001

12 x 120-Tücher = 1 VE¹⁾

¹⁾VE = Verpackungseinheit

LEERDOSE - etikettiert OHNE Tücher

BSW-Nr.: 13888001

einzel erhältlich

WC-Sitz-Desinfektionstuchspender

BSW-Nr.: 13510001

einzel erhältlich



Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Erkenntnisse. Wir erteilen sie unverbindlich. Sie stellen weder eine Garantie dar noch wird hierdurch ein Vertragsverhältnis begründet. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor. Wir bitten Sie, die Produkte stets selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen.

Peter Greven Physioderm GmbH

Procter-&-Gamble-Str. 26

53881 Euskirchen

Fon: 02251/77617-0

Fax: 02251/77617-44

Internet: www.physioderm.de

E-Mail: info@physioderm.de