

DER VOLLTREFFER FÜR PROFI-FLÄCHENDESINFEKTION

Incidin® Pro

Das neue, aldehydfreie Desinfektionsmittel für Medizinprodukte und Oberflächen

NEU! JETZT AUCH
IM PRAKTISCHEN
DOSIERBEUTEL!

Incidin® Pro setzt mit seiner SMART-BALANCED-Formel einen neuen Standard für die Profi-Reinigung und Desinfektion von Oberflächen.

- ▶ Ihr Pro für Schnelligkeit
- ▶ Ihr Pro für Effektivität
- ▶ Ihr Pro für Verträglichkeit



Incidin® Pro

Das neue, aldehydfreie Desinfektionsmittel für Medizinprodukte und Oberflächen

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Breites Wirkspektrum - nach den neuesten EN Standards getestet	Effektive Desinfektion und Reinigung
Kurze Einwirkzeiten bei niedrigen Anwendungskonzentrationen	Zeit- und Kostenersparnis
Exzellente Reinigungsleistung	Saubere Oberflächen mit hoher Materialkompatibilität
Exzellente Verträglichkeit	Verträglich mit Metallen, Linoleum, PVC, Keramik, Gummi und Kunststoff

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION		EINWIRKZEIT Min.
	%	ml/L	
VAH-Liste (bakterizid, levurozid)			
Flächendesinfektion gemäß VAH, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	0,5/1,0	5/10	30/15
Gem. RKI-Empfehlung 1/2004			
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	0,25/0,5	2,5/5	30/15
EURO-Normen			
EN 13727 (bakterizid, mit/ohne Belastung)	0,25	2,5	5
EN 13624 (levurozid, mit/ohne Belastung)	0,25	2,5	5
EN 14348 (mykobakterizid)	1,5	15	60
EN 14476 (Norovirus)	1,0/1,5	10/15	60/30
Prüfung nach DGHM 2001			
Mykobakterizid	2,0/4,0	20/40	120/60
Prüfung gemäß DVV 2008			
Norovirus (MNV)	1,5	15	30
Rotavirus	1,0/1,5	10/15	60/5
Adenovirus	2,0	20	60
Polyomavirus SV40	1,5	15	15

WORLDWIDE HEADQUARTERS

370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Phone +49 (0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de



SCHNELL.
EFFEKTIV.
VERTRÄGLICH.



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte



Flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion von Flächen aller Art.
Ⓢ BIOZID N-54665

ANWENDUNGSBEREICHE

Zur professionellen Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und Oberflächen.

HINWEISE

Biozide sicher verwenden. Lesen Sie vor der Anwendung stets das Etikett und die Produktinformationen. Entsorgen Sie die Verpackung nur in entleertem und verschlossenem Zustand. Produktrückstände: siehe Sicherheitsdatenblatt.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g ist als Wirkstoff enthalten: 10,0 g 2-Phenoxyethanol, 8,0 g N,N-bis-(3-Aminopropyl)dodecylamin, 7,5 g Benzalkoniumchlorid

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin® Pro Dosierbeutel	400 x 20 ml	30 765 60 PZN 108 328 71
Incidin® Pro Nachfüllflasche	3 x 2 L	30 766 80 PZN 101 793 88
Incidin® Pro Kanister	6 L	30 767 60 PZN 101 793 71
Incidin® Pro Kanister	30 L	30 767 80
Incidin® Pro Fass	200 L	30 767 90

BIOZIDE SICHER VERWENDEN.
VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.

