

MoliCare® Form

Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Bei MoliCare® Form handelt es sich um saugfähige Einlagen zur Inkontinenzversorgung. In Kombination mit Fixierhosen eignen sich die Produkte für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Blasenschwäche sowie unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz.


Produkte der Reihe MoliCare® Form sind für die Verwendung bei mobilen bis hin zu immobilen Frauen und Männern ausgelegt.

Die Produkte sind ausschließlich zur einmaligen Benutzung gedacht und sollten regelmäßig je nach Bedarf gewechselt werden.

Produkte der Reihe MoliCare® Form können sowohl in der häuslichen Pflege als auch in professionellen Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. Sie können dabei von medizinischen Fachkräften und Laien gleichermaßen verwendet werden.

Anwendung/Indikation

Harn- und Stuhlinkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden

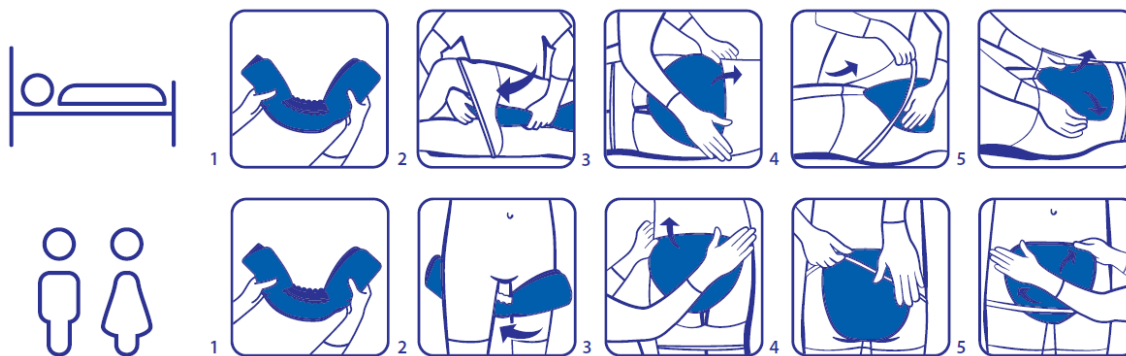

Artikelnummern*

Verpackung	P32	P2
4 Tropfen	168 444	168 244
5 Tropfen	168 445	168 245
6 Tropfen	168 446	168 246
8 Tropfen	168 448	168 248

*Das komplette Sortiment ist möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich

Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage. Eine Wiederverwendung des Produkts kann zu mikrobiellen Kontaminationen und/oder leichten Hautinfektionen führen.

MoliCare® Form

Produktentsorgung

Um das Risiko potentieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sind Einmalkomponenten von MoliCare® Form entsprechend den Entsorgungsverfahren gemäß den geltenden lokalen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen sowie den Standards zur Infektionsprävention zu entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte); wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.

Leistungsmerkmale des Produkts

Eigenschaften	Einheit	4 Tropfen	5 Tropfen	6 Tropfen	8 Tropfen
Gesamtgewicht:*	[g]	55	59	88	97

* ± 10 % Maßabweichung

Materialeigenschaften

Teil	Material
Rückseite:	Polyethylen, Vlies-Folien-Laminat, weiß
Saugkern	Zellstoff* Superabsorbierendes Polymer pH-Pufferlösung Vlies, hydrophil, weiß
Kleber:	Schmelzkraftkleber
Oberseite:	Polypropylen-Vlies, hydrophil, weiß
Bündchen:	Polypropylen-Vlies, hydrophob, weiß
Elastikfäden:	Elastikfäden für Beinabschluss und Innenbündchen
Nässeindikator:	Wasserlösliche Tinte

*elementarchlorfrei gebleicht

Produktmerkmale

MoliCare® Form

Abmessungen	4 Tropfen	5 Tropfen	6 Tropfen	8 Tropfen
Gesamtlänge:*	620	620	690	690
Gesamtbreite Bauchseite:*	280	280	300	300
Gesamtbreite Rückenseite:*	295	295	310	310
Schrittbreite:*	235	235	245	245
Länge Saugkern:*	560	560	630	630
Breite Saugkern Bauchseite:*	240	240	250	250
Breite Saugkern Rückenseite:*	240	240	260	260
Breite Saugkern im Schritt:*	160	160	170	170

* ± 10 % Maßabweichung

MoliCare® Form

Kennzeichnung


Fertigungslosnummer mit 9-stelligem Code

z. B.: 100102822



1	001	02	82	2
Jahr 202X	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Kumulierte Prüzfiffer

Herstellungsdatum

z. B.:  2021 08 07
Jahr Monat Tag

Verwendbar bis

z. B.:  2026 08 01
Jahr Monat Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

Medizinprodukt



Vertrieb



Trocken aufbewahren



Nicht wiederverwenden



CE-Kennzeichnung



Letzter Überarbeitungsstand: 22.11.2021