

Desinfektionstücher

DESCODERM PADS

Sterile, alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

- Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung
- Grundlegende, schnelle Wirksamkeit
- Besonders geeignet zur Desinfektion von kleinen Medizinprodukten (z. B. Ventilmembran-Konnektor)



Produktbeschreibung

DESCODERM PADS sind alkoholische, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten.

DESCODERM PADS ermöglichen insbesondere bei der Desinfektion und Reinigung von Ventilmembran-Konnektoren eine praxisnahe und zeitsparende sowie aufgrund der vorhandenen Sterilität des Produkts, eine sichere Anwendung. Die Tücher sind einzeln in einem praktischen Sachet verpackt.

Anwendungsgebiete

Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Medizinprodukten.

Reinigung der intakten Haut.

Anwendung

Tuch aus Sachet entnehmen. Flächen mit DESCODERM PADS ausreichend benetzen und Einwirkzeit einhalten.

Anwendungshinweise

Die Sterilität ist nur gewährleistet, wenn die Verpackung nicht geöffnet und unbeschädigt ist. Produkt ist in Endverpackung mittels Gamma-Strahlung sterilisiert. Das Tuch ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			15 s	30 s	1 min
Anwendungsempfehlung zur Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten	EN				•
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung	•		
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung		•	
behüllte Viren					
wirksam gegen alle behüllten Viren (begrenzt viruzid)	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	•		
ergänzende Prüfergebnisse					
bakterizid	EN 13727	niedrige und hohe Belastung	•		
levurozid (Candida albicans)	EN 13624	niedrige und hohe Belastung	•		

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 63,1 g 2-Propanol

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Entzündbarer Feststoff. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flam-

men sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Größe	Art. Nr.
DESCODERM PADS	Einzelsachet	100 Sachets	12	6 x 8 cm	00-401-T100-01

STERILE R CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

